
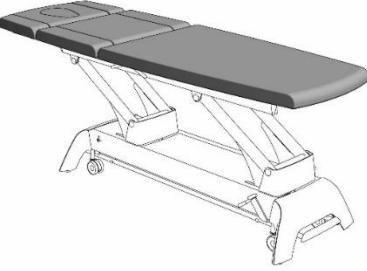
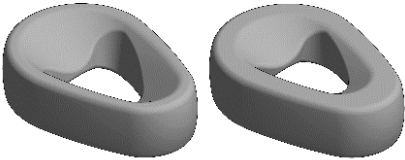


	Generale	Pulizia	Disinfezione
Costruzione 	Materiale: <ul style="list-style-type: none"> • Acciaio o alluminio verniciato a polvere • Acciaio, cromato o lavello placcato • Plastica dura e morbida • Impiallacciatura di faggio pressata e incollata (gymna.ONE) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire regolarmente la superficie con un panno in microfibra pulito, morbido e asciutto. • Per lo sporco ostinato, si può utilizzare un panno leggermente umido se necessario. • Usare in tal senso acqua pulita o detergente per vetri. • Rimuovere immediatamente eventuali liquidi rovesciati. 	<p>Se necessario, la struttura può essere disinfettata con lo stesso metodo utilizzato per i cuscini o Ergomax.</p>
Cuscini 	Materiale: <ul style="list-style-type: none"> • Vinile similpelle 'Classique' • Poliuretano similpelle 'Premium' Dettagli: <ul style="list-style-type: none"> • Senza ftalati • Biocompatibile • Premium è opzionale per gymna.PRO 	<ul style="list-style-type: none"> • Per la pulizia, usare acqua tiepida e un panno in microfibra. • Utilizzare una soluzione di sapone a pH neutro per lo sporco ostinato. • Rimuovere i residui di sapone con un panno umido. 	<p>N.B.: Prima pulire prima della disinfezione.</p> <p>I cuscini e Ergomax possono essere disinfettati con un gran numero di disinfettanti. I disinfettanti approvati sono elencati a pagina 2.</p>
Ergomax 	Materiale: <ul style="list-style-type: none"> • Schiuma di poliuretano Dettagli: <ul style="list-style-type: none"> • Ergomax è impermeabile e può essere facilmente lavato sotto il rubinetto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Macchie di sangue devono essere rimosse immediatamente con acqua fredda. • Rimuovere immediatamente l'olio da massaggio con una soluzione di sapone a pH neutro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguire sempre la concentrazione prescritta come elencato o come indicato sulla confezione. • Utilizzare solo un disinfettante e risciacquare con acqua pulita.
Linee guida extra	<ul style="list-style-type: none"> • NON usare IN NESSUN CASO detersivi, solventi (alcool), saponi aggressivi, candeggina o abrasivi. • Non utilizzare prodotti per la manutenzione del rivestimento in pelle contenenti olio o grasso. • Non usare mai una miscela di vari disinfettanti. • I cuscini non sono indicati per la disinfezione o la sterilizzazione a caldo. 		

Disinfettante	Classique	Premium
Acryl-des	●	
Actichlor Plus		● 5000 ppm
Actrill Cold Sterilant		● 100%
Aldasan 2000	●	
Alpet D2	●	
Antifect FD 10	●	
Antigone wipes	●	
Antiseptica Kombi Flächen	●	
B10	●	
Bacillol 30 foam	●	● 100%
Bacillol 30 tissues		●
Bacillol AF	●	
Bacillol AF-tissues	●	
Biguacid Plus	●	
Biguacid-S	●	
Biguanid Fläche N	●	● 4%
Chlor-Clean tablets		● 5000 ppm
Cleanisept	●	
Clinell Alcohol wipes	●	
Clinell Sporidical wipes		●
Clinell Universal wipes	●	
Clorina	●	
CosiMed	●	
Descocid-N	●	
Descogen Liquid	●	
Descosept AF	●	
Desomed Rapid Universal	●	
Dettol		● 5%
Dismozon pur		● 4%
Esemfix	●	
Ethanol		● 75%
Formaldehyde		● 30%
Fugaten	●	
Germatol		● 100%
Gevisol	●	
Haz-Tabs		● 5000 ppm
Hexaquart plus	●	
Hexaquart SF	●	
Hospisept - wipes	●	
Hydrogenperoxide		● 30%

Disinfettante	Classique	Premium
Immix Clean	●	
Incidin Extra N		● 5%
Incidin foam		● 100%
Incidin OxyFoam		● 100%
Incidin OxyFoam S		● 100%
Incidin OxyWipe S		●
Incidin Plus		● 4%
Incidur Active	●	
Incidur Extra	●	
Incidur Extra N	●	
Incidur Foam	●	
Incidur Liquid Spray	●	
Incidur Perfekt	●	
Incidur Plus	●	
Incidur rapid	●	
Incidur Spray	●	
Isopropanol		● 45%
Joya	●	
Kohrsolin extra tissues	●	
Lysoformin	●	
Lysoformin 2000	●	
Lysoformin spezial	●	
Maxitücher Alkoholfrei		●
Maxitücher Gebrauchsfertig Ruck		●
Meliseptol	●	● 100%
Meliseptol foam pure + fresh	●	
Meliseptol rapid	●	
Melsept SF	●	
Melsitt	●	
Micro Clean	●	
Micro Clean Foam	●	
Mikrobac forte	●	
Mikrobac tissues	●	
Mikrozid AF liquid	●	
Mikrozid AF wipes	●	●
Mikrozid sensitive liquid	●	
Mikrozid sensitive wipes	●	
Mikrozid universal wipes premium		●

Disinfettante	Classique	Premium
Neoform M rapid	●	
Optisal N	●	
Optisept	●	
P3-topax 66		● 5%
Perform	●	
Pursept-A Xpress	●	
Pursept-FD	●	
Sagrotan Hygiene-spray	●	● 100%
Sani-Cloth Active - wipes	●	
Sanit P20		● 100%
Septapin Aquaquick	●	
Septapin wipes	●	
Sodium hypochlorite		● 5000 ppm
Sprint 200		● 2%
Suma bac D10		● 1%
Suma Tab D4	●	
Surfa Safe	●	
Surfa Safe Premium		● 100%
Surfanios Premium		● 3%
Terralin liquid	●	
Terralin protect	●	● 4%
Topmax 421		● 5%
TPH protect	●	
Trichlorol	●	
Ultrasol active		● 5%
Umonium medical spray		● 100%
Virkon		● 1%
Volvone		● 40%

Disconoscimento

GymnaUniphy NV non si assume alcuna responsabilità in merito all'effetto disinfettante degli agenti sopra elencati.

© 2020 GymnaUniphy NV

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in una banca dati automatizzata o divulgata in qualsiasi forma e mediante qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o in altro modo, senza previa autorizzazione scritta di GymnaUniphy NV.