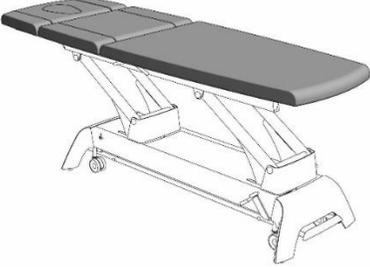
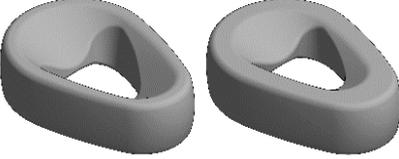


	Allgemeines	Reinigen	Desinfizieren
<b>Konstruktion</b> 	<b>Materialien:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl oder Aluminium mit Pulverlack</li> <li>• Stahl mit Zink oder Chrom Beschichtung</li> <li>• Harte und weiche Kunststoffe</li> <li>• Gepresstem und geleimtem Buchenfurnier (gymna.ONE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem sauberen, weichen und trockenen Mikrofasertuch.</li> <li>• Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann unter Umständen ein feuchtes Tuch verwendet werden.</li> <li>• Verwenden Sie hierfür klares Wasser oder einen Glasreiniger.</li> <li>• Entfernen Sie sofort eventuell verschüttete Flüssigkeiten.</li> </ul>	Falls gewünscht, kann die Desinfektion wie bei den Polstern und Ergomax durchgeführt werden.
<b>Polster</b> 	<b>Materialien:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vinyl Kunstleder 'Classique'</li> <li>• Polyurethan Kunstleder 'Premium'</li> </ul> <b>Besonderheiten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phthalaat frei</li> <li>• Biokompatibel</li> <li>• Premium ist optional beim gymna.PRO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie für die Reinigung lauwarmes Wasser und ein Mikrofasertuch.</li> <li>• Verwenden Sie für hartnäckige Verschmutzungen zusätzlich eine pH-neutrale Seifenlösung.</li> <li>• Entfernen Sie die Seifenreste mit einem feuchten Tuch.</li> </ul>	Vorsicht: Reinigen Sie die Polster vor dem Desinfizieren.  Die Polster und Ergomax können mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. Diese sind in der Tabelle auf <a href="#">Seite 2</a> aufgeführt.
<b>Ergomax</b> 	<b>Materialien:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyurethan-Vollschaum</li> </ul> <b>Besonderheiten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserdicht, kann einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blutflecken müssen sofort mit kaltem Wasser entfernt werden.</li> <li>• Massageöl muss sofort mit einer pH-neutralen Seifenlösung entfernt werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung bezüglich Konzentration und Verwendung.</li> <li>• Verwenden Sie nur ein Desinfektionsmittel und spülen Sie es mit sauberem Wasser ab.</li> </ul>
<b>Zusätzliche Anweisungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie AUF KEINEN FALL Reinigungsmittel, Lösungsmittel (Alkohol), aggressive Seifen und Bleich- oder Scheuermittel.</li> <li>• Verwenden Sie keine Pflegemittel für Leder, in denen Öl oder Fett enthalten ist.</li> <li>• Verwenden Sie niemals eine Mischung verschiedener Desinfektionsmittel.</li> <li>• Die Polster eignen sich nicht für eine Desinfektion oder Sterilisation durch Wärme.</li> </ul>		

Desinfektionsmittel	Classique	Premium
Acryl-des	●	
Actichlor Plus		● 5000 ppm
Actrill Cold Sterilant		● 100%
Aldasan 2000	●	
Alpet D2	●	
Antifect FD 10	●	
Antigone wipes	●	
Antiseptica Kombi Flächen	●	
B10	●	
Bacillol 30 foam	●	● 100%
Bacillol 30 tissues		●
Bacillol AF	●	
Bacillol AF-tissues	●	
Biguacid Plus	●	
Biguacid-S	●	
Biguanid Fläche N	●	● 4%
Chlor-Clean tablets		● 5000 ppm
Cleanisept	●	
Clinell Alcohol wipes	●	
Clinell Sporicidal wipes		●
Clinell Universal wipes	●	
Clorina	●	
CosiMed	●	
Descocid-N	●	
Descogen Liquid	●	
Descosept AF	●	
Desomed Rapid Universal	●	
Dettol		● 5%
Dismozon pur		● 4%
Esemfix	●	
Ethanol		● 75%
Formaldehyde		● 30%
Fugaten	●	
Germatol		● 100%
Gevisol	●	
Haz-Tabs		● 5000 ppm
Hexaquart plus	●	
Hexaquart SF	●	
Hospisept - wipes	●	
Hydrogenperoxide		● 30%

Desinfektionsmittel	Classique	Premium
Immix Clean	●	
Incidin Extra N		● 5%
Incidin foam		● 100%
Incidin OxyFoam		● 100%
Incidin OxyFoam S		● 100%
Incidin OxyWipe S		●
Incidin Plus		● 4%
Incidur Active	●	
Incidur Extra	●	
Incidur Extra N	●	
Incidur Foam	●	
Incidur Liquid Spray	●	
Incidur Perfekt	●	
Incidur Plus	●	
Incidur rapid	●	
Incidur Spray	●	
Isopropanol		● 45%
Joya	●	
Kohrsolin extra tissues	●	
Lysoformin	●	
Lysoformin 2000	●	
Lysoformin spezial	●	
Maxitücher Alkoholfrei		●
Maxitücher Gebrauchsfertig Ruck		●
Meliseptol	●	● 100%
Meliseptol foam pure + fresh	●	
Meliseptol rapid	●	
Melsept SF	●	
Melsitt	●	
Micro Clean	●	
Micro Clean Foam	●	
Mikrobac forte	●	
Mikrobac tissues	●	
Mikrozid AF liquid	●	
Mikrozid AF wipes	●	●
Mikrozid sensitive liquid	●	
Mikrozid sensitive wipes	●	
Mikrozid universal wipes premium		●

Desinfektionsmittel	Classique	Premium
Neoform M rapid	●	
Optisal N	●	
Optisept	●	
P3-topax 66		● 5%
Perform	●	
Pursept-A Xpress	●	
Pursept-FD	●	
Sagrotan Hygiene-spray	●	● 100%
Sani-Cloth Active - wipes	●	
Sanit P20		● 100%
Septapin Aquaquick	●	
Septapin wipes	●	
Sodium hypochlorite		● 5000 ppm
Sprint 200		● 2%
Suma bac D10		● 1%
Suma Tab D4	●	
Surfa Safe	●	
Surfa Safe Premium		● 100%
Surfanios Premium		● 3%
Terralin liquid	●	
Terralin protect	●	● 4%
Topmax 421		● 5%
TPH protect	●	
Trichlorol	●	
Ultrasol active		● 5%
Umonium medical spray		● 100%
Virkon		● 1%
Volvone		● 40%

## Disclaimer

GymnaUniphy NV übernimmt keine Verantwortung für die Desinfektionswirkung der oben beschriebenen Wirkstoffe.

© 2020 GymnaUniphy NV

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Ausgabe darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von GymnaUniphy N.V in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, durch Vervielfältigungen, Aufnahmen oder auf andere Art und Weise kopiert, in einer automatisierten Datei gespeichert oder veröffentlicht werden.